



Gebrauchsanweisung

Danke, dass Sie sich für Elvie entschieden haben – wir freuen uns, dass Sie hier sind.

Es ist unsere Mission, Produkte zu schaffen, die das Leben von Frauen verbessern, daher hoffen wir, dass Elvie Catch Ihr Leben positiv beeinflusst

Pflege des Elvie Catch

Nehmen Sie Elvie Catch vor der Reinigung und Sterilisation auseinander.

Sterilisation (vor der ersten Verwendung und danach einmal täglich):

Alle Teile fünf Minuten lang in kochendem Wasser sterilisieren.

ODER Für Mikrowellen-, Dampf- oder Kaltwasser-Sterilisationsverfahren geeignet.


Reinigung (nach jedem Gebrauch):

Waschen Sie die Teile mit klarem Seifenwasser.

Spülen Sie sie gründlich ab.

ODER geben Sie sie in den oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.

Elvie Catch sollte sauber, trocken und vollständig zusammengesetzt aufbewahrt werden.

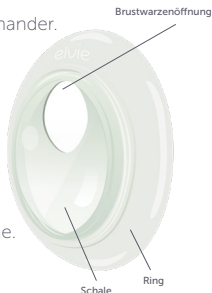

Verwendung von Elvie Catch

1. Drücken Sie die Schale in die Nut des Rings hinein.
Stellen Sie sicher, dass sie vollständig hineingedrückt wurde
2. Platzieren Sie die Auffangschale in Ihren BH, so dass sie sicher festsetzt. Für den optimalen Sitz und Komfort empfehlen wir Elvie Catch mit einem Still-BH zu tragen
3. Richten Sie Ihre Brustwarze in der Mitte der Brustwarzenöffnung aus
4. Kontrollieren Sie stets den Milchstand, um eine Überfüllung zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Milchstand die Unterseite der Brustwarzenöffnung nicht übersteigt
5. Wir empfehlen, Elvie Catch alle 2-3 Stunden zu entfernen, damit Ihre Brustwarze vollständig an der Luft trocknet
Beim Entfernen kann es helfen, sich leicht nach vorne zu beugen
6. Elvie Catch ist nicht dafür konzipiert, Milch aufzubewahren.
Füllen Sie die Milch von oben durch die Brustwarzenöffnung, wie in der Abbildung gezeigt



Bitten beachten Sie: Sie sollten Ihr Baby nicht mit Milch füttern, die über einen längeren Zeitraum gesammelt und bei Raumtemperatur stehen gelassen wurde.

Sicherheit und Garantie

Vorgesehene Verwendung:

„Elvie Catch“ wird von stillenden Frauen dazu verwendet, die während und zwischen den Stillphasen auslaufende Milch zu sammeln, wenn es dabei zu einem unbeabsichtigten Fluss der Muttermilch kommt.

Materialien:

Der Ring: Silikon, Schale: Polypropylen

Sicherheit und Warnhinweise:

- Vor der ersten und nach jeder Verwendung auf Schäden prüfen
- Feuchte oder nasse Teile nicht lagern, da Schimmel einsetzen kann
- Keine Fremdkörper in die Öffnungen des Geräts fallen lassen oder einführen
- Wenn die Verpackung vor der ersten Verwendung beschädigt oder manipuliert zu sein scheint, verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren sie unser kundenbetreuungsteam.
- Halten Sie Elvie Catch von übermäßiger Hitze und offenen Flammen fern
- Tragen Sie Elvie Catch nicht länger als 3 Stunden
- Verwenden Sie Elvie Catch lediglich für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben

Garantie

Elvie Catch ist durch eine freiwillige beschränkte Herstellergarantie gegen jegliche Material- und/oder Verarbeitungsfehler abgedeckt, wenn sie in Übereinstimmung mit den Produkthanweisungen verwendet wird: für 90 Tage ab dem ursprünglichen Kaufdatum („Garantiezeit“). Diese Garantie wird kostenlos gewährt und ist unabhängig von allen Rechten, die gemäß den Verbrauchergesetzen und -vorschriften des Kauflandes vorgesehen sind. Sie schließt Verbraucherrechte oder Rechtsansprüche, die sich aus nationalen Gesetzen über den Verkauf von Verbraucherprodukten ergeben, nicht aus, schränkt sie nicht ein oder beeinträchtigt sie nicht. Diese Garantie richtet sich nach den Gesetzen, in deren Rahmen das Produkt gekauft wurde, und ist gemäß diesen Gesetzen aufgebaut. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf kosmetische Verschlechterung, Schäden durch allgemeine Abnutzung, physische oder natürliche Zerstörung, Unfall, Missbrauch, Modifikationen, Vernachlässigung oder andere äußere Ursachen. Dies ist ein Produkt für Einzelanwenderinnen. Die Verwendung durch mehr als eine Person kann ein Gesundheitsrisiko darstellen und führt Wenn Sie innerhalb der Garantiezeit ein Problem mit Ihrer Elvie Catch haben oder Mängel feststellen, benachrichtigen Sie bitte Chiaro Technology Limited („Chiaro“) unter questions@elvie.com. Chiaro behält sich das Recht vor, die Ursache des Mangels zu untersuchen und kann nach eigenem Ermessen entscheiden, ob das Produkt oder relevante Teile kostenlos ersetzt werden sollen oder nicht. Für den Fall, dass Chiaro beschließt, einen Ersatz zur Verfügung zu stellen, wird die Laufzeit dieser Garantie durch einen Ersatz nicht verlängert.

Die alleinige Verantwortung und Haftung von Chiaro für jegliche Verletzung dieser beschränkten Garantie beschränkt sich auf den Ersatz eines Produkts, das nicht der vorstehenden Garantie entspricht. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg für den Fall auf, dass Sie den Elvie-Kundendienst für Garantieleistungen kontaktieren müssen.

Labels



Lebensmittelsicherheit



Recyclingsymbol



Gebrauchsanweisung konsultieren



Hersteller



Herstellungsdatum



Chargennummer
