



Gebrauchsanweisung

Danke, dass Sie sich für Elvie entschieden haben – wir freuen uns, dass Sie hier sind.

Es ist unsere Mission, Produkte zu schaffen, die das Leben von Frauen verbessern, daher hoffen wir, dass Elvie Curve Ihr Leben positiv beeinflusst

Pflege des Elvie Curve

Nehmen Sie Elvie Curve vor der Reinigung und Sterilisation auseinander.

Sterilisation (vor der ersten Verwendung und danach einmal täglich):

Alle Teile fünf Minuten lang in kochendem Wasser sterilisieren.

ODER Für Mikrowellen-, Dampf- oder Kaltwasser-Sterilisationsverfahren geeignet.

Reinigung (nach jedem Gebrauch):



Waschen Sie die Teile mit klarem Seifenwasser.

Spülen Sie sie gründlich ab.

ODER geben Sie sie in den oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.

Elvie Curve sollte sauber, trocken und vollständig zusammengesetzt aufbewahrt werden.

Brustwarzenöffnung

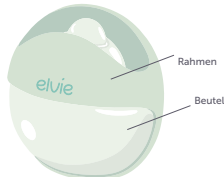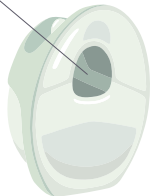

Verwendung von Elvie Curve

Eine Sitzung starten:

1. Schieben Sie den Beutel in den Rahmen hinein
2. Platzieren Sie Ihre Brustwarze in der Mitte der Brustwarzenöffnung, sodass es sich angenehm anfühlt und sie die Innenseiten des Beutels nicht berührt
3. Drücken Sie auf den Beutel, um Saugkraft zu erzeugen. Wenn sich die erzeugte Saugkraft unangenehm anfühlt, drücken Sie leicht auf das Ventil, um es zu öffnen und Luft abzulassen
4. Stellen Sie sicher, dass Ihre Brustwarze immer noch mittig ausgerichtet ist
5. Platzieren und ziehen Sie Ihren Still-BH über Elvie Curve. Drücken Sie ihn fest auf Ihre Brust, ohne dass Zwischenräume verbleiben
6. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Saugkraft nachlässt, drücken Sie den Beutel nochmals, um die Saugkraft und den Milchfluss zu erhalten. Das können Sie durch Ihren BH tun. Möglicherweise müssen Sie das alle paar Minuten machen – mit der Zeit werden Sie herausfinden, was für Sie am besten funktioniert
7. Behalten Sie den Milchstand im Auge, um eine Überfüllung zu vermeiden

Ihre Sitzung beenden:

1. Drücken Sie das Ventil, um es zu öffnen und Druck abzulassen, lösen Sie dann mit dem Finger das Vakuum um Ihre Brustwarze
2. Legen Sie Elvie Curve auf die Vorderseite, bis Sie bereit sind, Ihre Milch in einen Behälter zu füllen
3. Elvie Curve ist nicht dafür konzipiert, Milch aufzubewahren. Füllen Sie durch die Brustwarzenöffnung um, um wie auf dem Bild dargestellt, die Milch aus dem Beutel und dem Ventil zu leeren



Bitte beachten Sie: Sie sollten Ihr Baby nicht mit Milch füttern, die über einen längeren Zeitraum gesammelt und bei Raumtemperatur stehen gelassen wurde.

Sicherheit und Garantie

Vorgesehene Verwendung:

„Elvie Curve“ ist eine nicht elektrische Milchpumpe, die von stillenden Frauen verwendet wird, um Muttermilch abzupumpen und zu sammeln.

„Elvie Curve“ ist für Einzelanwenderinnen vorgesehen. [...](#)

Materialien:

Beutel: Silikon, Rahmen: Polypropylen

Sicherheit und Warnhinweise:

- Vor der ersten und nach jeder Verwendung auf Schäden prüfen
- Feuchte oder nasse Teile nicht lagern, da Schimmel einsetzen kann
- Keine Fremdkörper in die Öffnungen des Geräts fallen lassen oder einführen
- Wenn die Verpackung vor der ersten Verwendung beschädigt oder manipuliert zu sein scheint, verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren Sie unser Kundenbetreuungsteam

- Halten Sie Elvie Curve von Wärmequellen fern und setzen Sie sie weder offenen Flammen noch übermäßiger Hitze aus.
- Elvie Curve sollte nicht beim Liegen, bei der Durchführung anstrengender Übungen oder bei Aktivitäten mit Verletzungsrisiko verwendet werden.
- Ziehen Sie Elvie Curve nicht an, wenn Sie nicht aktiv mit dem Produkt abpumpen.
- Verwenden Sie Elvie Curve nicht beim Fahren oder beim Hantieren mit schweren Maschinen.
- Beginnen Sie erst nach der Geburt mit dem Abpumpen, denn dadurch können die Wehen einsetzen.
- Verwenden Sie Elvie Curve lediglich für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben

Garantie

Elvie Curve ist durch eine freiwillige beschränkte Herstellergarantie gegen jegliche Material- und/oder Verarbeitungsfehler abgedeckt, wenn sie in Übereinstimmung mit den Produkthanweisungen verwendet wird: für 90 Tage ab dem ursprünglichen Kaufdatum („Garantiezeit“). Diese Garantie wird kostenlos gewährt und ist unabhängig von allen Rechten, die gemäß den Verbrauchergesetzen und -vorschriften des Kauflandes vorgesehen sind. Sie schließt Verbraucherrechte oder Rechtsansprüche, die sich aus nationalen Gesetzen über den Verkauf von Verbraucherprodukten ergeben, nicht aus, schränkt sie nicht ein oder beeinträchtigt sie nicht. Diese Garantie richtet sich nach den Gesetzen, in deren Rahmen das Produkt gekauft wurde, und ist gemäß diesen Gesetzen aufgebaut. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf kosmetische Verschlechterung, Schäden durch allgemeine Abnutzung, physische oder natürliche Zerstörung, Unfall, Missbrauch, Modifikationen, Vernachlässigung oder andere äußere Ursachen. Dies ist ein Produkt für Einzelanwenderinnen. Die Verwendung durch mehr als eine Person kann ein Gesundheitsrisiko darstellen und führt zum Erlöschen der Garantie. Wenn Sie innerhalb der Garantiezeit ein Problem mit Ihrer Elvie Curve haben oder Mängel feststellen, benachrichtigen Sie bitte Chiaro Technology Limited („Chiaro“) unter questions@elvie.com. Chiaro behält sich das Recht vor, die Ursache des Mangels zu untersuchen und kann nach eigenem Ermessen entscheiden, ob das Produkt oder relevante Teile kostenlos ersetzt werden sollen oder nicht. Für den Fall, dass Chiaro beschließt, einen Ersatz zur Verfügung zu stellen, wird die Laufzeit dieser Garantie durch einen Ersatz nicht verlängert.

Die alleinige Verantwortung und Haftung von Chiaro für jegliche Verletzung dieser beschränkten Garantie beschränkt sich auf den Ersatz eines Produkts, das nicht der vorstehenden Garantie entspricht.

Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg für den Fall auf, dass Sie den Elvie-Kundendienst für Garantieleistungen kontaktieren müssen.

Labels



Lebensmittelsicherheit



Recyclingsymbol



Gebrauchsanweisung konsultieren



Hersteller



Herstellungsdatum



Chargennummer

Manufactured and Distributed by Chiaro Technology Limited

Model number: EC01

Document number: EL-S-0014-01

